

ACIST | RXi[®] Mini[™]

GUIDE RAPIDE



Bracco Group

 **ACIST[®]**
the power to



ACIST | RXi®

Système FFR à échange rapide

Le système RXi avec le microcathéter ultra fin ACIST Navvus® FFR à échange rapide offre la possibilité d'évaluer rapidement et facilement le FFR en utilisant le fil de 0,014" de votre choix.





Présentation du système RXi Mini



Vue d'ensemble du système : Interface Navvus

TÉMOIN DU SYSTÈME



TÉMOIN DU CATHÉTER




PORT DE COMMUNICATION



ACIST | RXi® Mini™

Vue d'ensemble du système : Câble d'interface Navvus

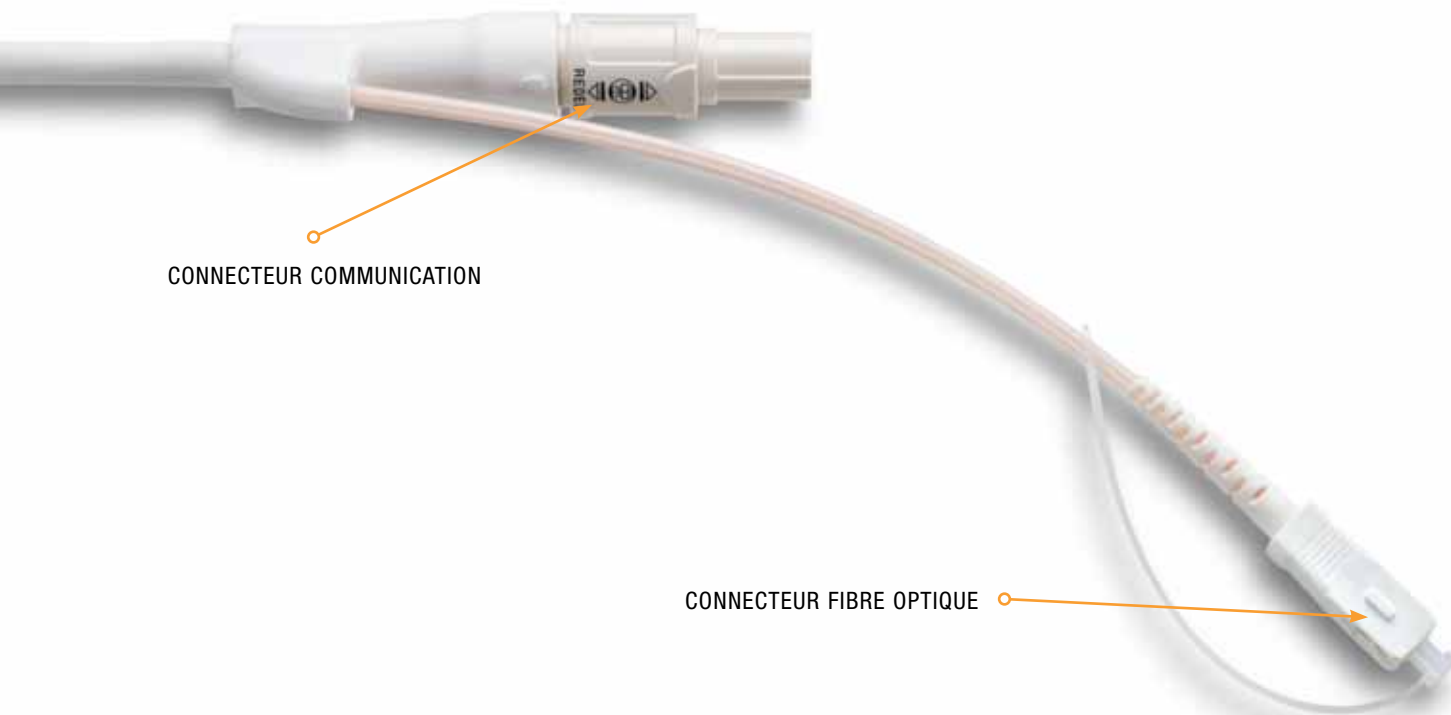

CONNECTEUR COMMUNICATION

CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE

Vue d'ensemble du système : Unité de traitement



Interprétation des messages d'erreur



L'unité de traitement possède 3 témoins :



TÉMOIN
D'INTERFACE
NAVVUS



TÉMOIN DU
SYSTÈME
HÉMODYNAMIQUE



TÉMOIN
D'ALIMENTATION

Scénarios de dépannage

INTERFACE NAVVUS	MESSAGES D'ALERTE PAR TÉMOIN DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT	MESSAGE D'ERREUR	ACTION SUGGÉRÉE
		Alimentation déconnectée	Raccordez le câble d'alimentation au système Mini et au secteur
		Alimentation hors tension	Allumez l'unité de traitement
		Absence de communication avec l'interface Navvus	Vérifiez que les connexions de l'interface Navvus entre cette dernière et l'unité de traitement sont sûres
		Erreur de l'unité de traitement	Mettez hors tension puis sous tension

Scénarios de dépannage

INTERFACE NAVVUS	MESSAGES D'ALERTE PAR TÉMOIN DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT	MESSAGE D'ERREUR	ACTION SUGGÉRÉE
		Unité de traitement non raccordée au système hémodynamique	Vérifiez que la connexion de l'unité de traitement avec le système hémodynamique est sûre
		Erreur de l'unité de traitement	Mettez hors tension puis sous tension

INTERFACE NAVVUS	MESSAGES D'ALERTE PAR TÉMOIN DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT	MESSAGE D'ERREUR	ACTION SUGGÉRÉE
 (Lumière clignotante et alarme sonore)		Système démarre	Le système effectue son test de démarrage
		Le système est prêt	Le système est prêt à être connecté avec le Cathéter Navvus

Scénarios de dépannage

INTERFACE NAVVUS	MESSAGES D'ALERTE PAR TÉMOIN DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT	MESSAGE D'ERREUR	ACTION SUGGÉRÉE
		Connexion incomplète (éventuelle interférence de débris avec la connexion à fibre optique)	Retirez le cathéter Navvus de l'interface Navvus et réinsérez-le, en vérifiant que le champ stérile ne soit pas enfoncé dans le port du cathéter lors de l'insertion de ce dernier
		Connecteur d'interface encrassé sur l'interface Navvus	Retirez le cathéter Navvus de l'interface Navvus, nettoyez l'interface Navvus avec un produit de nettoyage pour fibre optique et réinsérez le cathéter Navvus
		Connexion de cathéter incorrecte	Retirez le cathéter Navvus et réinsérez-le Retirez le cathéter Navvus de l'interface Navvus, insérez un nouveau cathéter et contactez l'assistance clientèle

INTERFACE NAVVUS	MESSAGES D'ALERTE PAR TÉMOIN DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT	MESSAGE D'ERREUR	ACTION SUGGÉRÉE
 (Lumière clignotante + alarme sonore)		Câble à fibre optique de l'interface Navvus mal connecté	Vérifiez que la partie fibre optique du câble d'interface Navvus est branchée sur l'interface Navvus et l'unité de traitement
		Le cathéter comporte une fibre optique rompue	Retirez le cathéter Navvus de l'interface Navvus, insérez un nouveau cathéter et contactez l'assistance clientèle



ACIST | RXi® et Navvus® sont des marques de commerce d'ACIST Medical Systems, Inc. ACIST Medical Systems, Inc., se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document ou d'interrompre la fabrication du produit décrit à tout moment, sans préavis ni obligation.

Contactez votre représentant agréé ACIST pour obtenir les informations les plus récentes.

Nous contacter aux États-Unis :

ACIST Medical Systems, Inc.
7905 Fuller Road
Eden Prairie, Minnesota 55344
Téléphone : +1 (952) 995-9300

Nous contacter en Europe :

ACIST Europe B.V.
Argonstraat 3
6422 PH Heerlen
Pays-Bas
Téléphone : +31 (45) 750 7000

Consultez notre site web :

www.acist.com

Bracco Group

© 2018 ACIST Medical Systems, Inc. Tous droits réservés. Référence : 0218.651.02_FR

